	<b>IDEAL HEALTH CARE SDN BHD</b>		Page 1 of 3
	<b>FOLEY CATHETER (IHSB-TF-104)</b>		
Nama Dokumen	Arahan Penggunaan– Latex Foley Catheter	No. Versi	0
No. Dokumen	IHSB-IFU-104	Tarikh	12 Dis 2021
No. Ref	IFU/002/00/21		

## **ARAHAN PENGGUNAAN**

### **PENERANGAN**

Latex Foley Catheter ialah tiub fleksibel yang disalurkan melalui tiub inflasi, tiub pengairan (jika ada), belon dan injap. Ia mudah digunakan, prestasi yang boleh dipercayai, dan bebas iritasi/keradangan..

Latex Foyel Catheter mempunyai ciri-ciri berikut:

- Diperbuat daripada susu getah asli
- Biokeserasian yang baik
- Permukaan bersalut silikon mengurangkan tindak balas alahan
- Hujung tirus yang licin memudahkan penggunaan
- Visual Berkod warna untuk kepastian saiz
- alternatif jenis lain jua disediakan
- Steril oleh EO
- Untuk kegunaan sekali sahaja

### **PENGGUNAAN / PETUNJUK YANG DIMAKSUDKAN**

Kateter Latex Foley disalurkan melalui saluran uretra semasa kateterisasi dan ke dalam pundi kencing untuk mengalirkan air kencing, atau untuk memasukkan cecair ke dalam pundi kencing. Ia digunakan dalam jabatan/unit urologi, perubatan dalaman, pembedahan, obstetrik, dan ginekologi untuk pengaliran air kencing dan ubat. Ia juga digunakan untuk pesakit yang mengalami kesukaran bergerak atau lumpuh.


### **KONTRAIKASI**

Untuk kateterisasi transurethral

- Akut Urethritis
- Akut Prostatitis
- Akut Epididimitis

### **AMARAN/LANGKAH BERJAGA-JAGA**

- Jangan gunakan jika bungkusan telah dibuka atau rosak.
- Kebocoran atau pengembangan belon hendaklah diuji sebelum digunakan.
- Produk ini bertujuan untuk digunakan oleh pakar perubatan yang terlatih dan teknik aseptik mesti diamalkan.
- Jangan kembungkan belon secara berlebihan. Rujuk kepada pek unit luar atau tiub kateter untuk kapasiti belon.

	<b>IDEAL HEALTH CARE SDN BHD</b>		Page 2 of 3
	<b>FOLEY CATHETER (IHSB-TF-104)</b>		
Nama Dokumen	Arahan Penggunaan– Latex Foley Catheter	No. Versi	0
No. Dokumen	IHSB-IFU-104	Tarikh	12 Dis 2021
No. Ref	IFU/002/00/21		

- Kembangkan belon kateter dengan air suling yang di steril.
- Jangan gunakan krim atau pelincir yang mempunyai asas petroleum. Gunakan minyak silikon atau pelincir air mudah larut.
- Jangan kepit tiub kateter. Ia boleh merosakkan kateter dan mencegah deflasi.
- Jangan gunakan jarum untuk mengembangkan belon. Gunakan picagari Luer.
- Untuk kegunaan pesakit tunggal sahaja.
- Ini adalah produk pakai buang untuk sekali penggunaan, sebarang pensterilan semula atau penggunaan semula produk boleh mendatangkan bahaya kepada pesakit/pengguna.
- Langkah berjaga-jaga hendaklah diambil apabila membuang peranti dan pelupusan peranti ini hendaklah dibuat mengikut peraturan negara yang digunakan untuk sisa biologi merbahaya.

#### **ARAHAN PENGGUNAAN**


- Melincirkan hujung dan tiub kateter dengan baik. Jangan gunakan krim dan pelincir yang mempunyai asas petroleum.
- Berhati-hati ketika masukkan hujung kateter ke dalam pundi kencing (biasanya ditunjukkan daripada saluran air kencing), dan lanjutkan 3cm lagi untuk memastikan belon juga berada di dalamnya.
- Gunakan set picagari luer untuk meniup belon. Isipadu yang disyorkan ditanda pada setiap tiub kateter.
- Untuk deflasi, potong tiub inflasi di atas injap, atau gunakan picagari tanpa jarum dan menolak ke dalam injap kateter untuk memudahkan pengaliran.
- Kateter tidak boleh disimpan/digunakan dalam badan manusia lebih 14 hari.

#### **AMARAN**

- Simpan di tempat yang sejuk dan kering.
- Untuk kegunaan pesakit tunggal sahaja.
- Produk Steril jika bungkusan tidak dibuka atau tidak rosak.
- Saiz dan kapasiti belon ditanda pada pek unit luar dan tiub kateter
- Jangan gunakan selepas tarikh luput.
- Tidak boleh digunakan oleh kakitangan yang tidak mahir atau tidak terlatih.
- Jangka hayat: 5 tahun selepas tarikh pembuatan.
- Buang selepas digunakan.

#### **KAEDAH PENYIMPANAN**

- Simpan di tempat yang sejuk dan kering.
- Elakkan tempat beku dan haba yang berlebihan.
- pengeluaran stok pertama masuk, pertama keluar(FIFO)

	<b>IDEAL HEALTH CARE SDN BHD</b>		Page 3 of 3
	<b>FOLEY CATHETER (IHSB-TF-104)</b>		
Nama Dokumen	Arahan Penggunaan– Latex Foley Catheter	No. Versi	0
No. Dokumen	IHSB-IFU-104	Tarikh	12 Dis 2021
No. Ref	IFU/002/00/21		

### Maksud setiap simbol

Disteril oleh	Jangan gunka jika bungkusan rosak
Jangan guna semula	Jauhkan daripada sinaran matahari
Jagan disteril semula	Pastikan Sentiasa kering
No catalog	Rujuk arahan penggunaan
Pembuat/pengilang	Guna sebelum
Wakil sah/eksklusif di dalam kesatuan eropah	Tarikh pembuatan
Preskripsi sahaja	No kumpulan

\*Sila lihat dokumen asal (Ref no. IFU/002/01/21)